

お口健康ナビ 新規受託開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、歯ぐきの健康・警戒レベル検査として、「お口健康ナビ」（郵送型検査）を新規受託開始させていただきますので、下記のとおりご案内申し上げます。

敬白

記

■受託開始日 令和元年 7 月 22 日（月）受付分より

■新規受託項目 お口健康ナビ（項目コード：8474）

■検査要項

本検査は患者様より、採取した唾液と採取キットに同封されている申込書兼アンケートを弊社に郵送していただく検査です。

※取扱い等につきましては、添付資料「お口健康ナビ注意事項」＜医療機関様向け＞をご参照下さい。

検査項目	検体量 (mL) 保存法 (安定性)	容器	検査方法	実施料 点数	所 日 要 数	備 考
8474 お口健康ナビ	唾液 2 常温	専用容器	リアルタイム PCR 法	—	約 3 週間	起床直後に唾液を採取 して下さい。

■留意事項

- ・専用容器（唾液採取キット）は医療機関様より患者様にお渡し下さい。また、採取方法は唾液採取キットの説明書に記載されていますので、ご参照下さい。
- ・検査結果は、お申込みいただいた医療機関様にご報告いたしますので、ご注意下さい。

■臨床的意義

最近の研究では、糖尿病や心筋梗塞、動脈硬化といった生活習慣病と歯周病の関連も明らかになっており、歯ぐきの現状を手軽に把握できる手段が求められていました。本検査は唾液を検体とし、歯周病の原因となる唾液中の歯周病菌の数を遺伝子解析技術でカウントした結果と生活習慣に関するアンケートの結果をもとに、「歯ぐきの健康警戒レベル」を解析いたします。

なお、本検査は歯科医師の直接の診断ではありませんが、統計的な手法により警戒レベルを算出するものであり、歯科医師の直接診断結果と同等な検査といわれています。

以上

*お問合せ先：0246-47-0866 保菌検査センター

2019-A-027