

専用容器追加のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の専用容器を従来のSurePathの容器に加え、ThinPrepでの受託を開始させていただきますので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■受託開始日 令和 8 年 5 月 1 日（金）受付分より

■変更内容

検査項目	変更内容	従来	追加
8100 細胞診婦人科材料	専用容器	41-a SurePath 	41-b ThinPrep 
1847 HPV核酸検出 (簡易ジェノタイプ判定)		内容 添加物エタノール ※使用前常温暗所保存 有効期間: 容器に表示	内容 添加物メタノール ※使用前常温暗所保存 有効期間: 容器に表示
3754 HPVジェノタイプ判定 〈ハイリスク 13 種〉			
1871 HPV-DNA型判定 〈マルチプレックス〉			

■ThinPrep採取方法



すすぐ

・ブラシをバイアル内のプレザーブサイト液に浸し、**容器の底で毛先が広がるように素早く 10 回押し付けて下さい。**バイアル内で最後に強くかき回してから、ブラシを廃棄して下さい。

(注意)ブルーム型ブラシの先端部分(白い部分)はバイアル内に落とさないで下さい。

・ブラシは提出せず廃棄して下さい。

蓋を閉める

・蓋の黒いラインがバイアルの黒いラインを超えるように、バイアルの蓋はしっかり閉めて下さい。

以上



Android用



iOS用

総合検査案内アプリは
こちらから

*お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション
2026-A-019